

現在ご利用いただいているSmartRobinでは、「SmartRobin AI クラウドサービス サービス利用規約」に則り、SmartRobin上でのデータ保管期限を以下通りとしております。

- ・ SmartRobin AI クラウドサービス : 6か月
- ・ SmartRobin AI Lite クラウドサービス : 1ヶ月

解析完了通知後、データ保管期限を経過したデータは、別途メール通知します削除日にSmartRobinより削除いたします。解析レポートの出力またはダウンロードを必要とされるユーザー様は、削除前に対応いただきますよう宜しくお願いいたします。

## ダウンロード方法

1. 該当する心電図の または アイコンをクリックし、ダウンロードしたいレポートを選択してください。クリックするとダウンロードが開始します。

SmartRobin ID	識別情報1	識別情報2	検査開始日時	年齢	性別	診療科	操作	詳細
0000005	HRジャンプ	demoData	2021/05/23 10:50:09			循環器内科		
測定期間: 8日間 有効解析時数: 163時間51分00秒 (91%) 心房細動区間: 0.00%							レポート	添付資料 心電図データ
SmartRobin ID	識別情報1	識別情報2	検査開始日時	年齢	性別	診療科	操作	詳細
0000003	sinus	demoData	2021/05/13 12:19:52			内科		
測定期間: 8日間 有効解析時数: 136時間15分30秒 (76%) 心房細動区間: 100.0%							フルレポート	サマリレポート

DL中は進捗が表示されます

2. 指定した保存先フォルダ又はダウンロード履歴より、ダウンロードデータを確認してください。（指定が無い場合は“ダウンロードフォルダ”に保存されています）

SmartRobin CI営業用デモ環境

心電図一覧

心電図を検索

測定日

所見種別

診療科

並び順

アップロード日時

合計4件: 1件 ~ 4件を表示

測定期間: 24時間 有効解析時数: 23時間52分00秒 (99%) 心房細動区間: 0.00%							レポート	添付資料 心電図データ
SmartRobin ID	識別情報1	識別情報2	検査開始日時	年齢	性別	診療科	操作	詳細
0000005	HRジャンプ	demoData	2021/05/23 10:50:09			循環器内科		
測定期間: 8日間 有効解析時数: 163時間51分00秒 (91%) 心房細動区間: 0.00%							レポート	添付資料 心電図データ
SmartRobin ID	識別情報1	識別情報2	検査開始日時	年齢	性別	診療科	操作	詳細
0000003	sinus	demoData	2021/05/13 12:19:52			内科		

3. ダウンロードが完了すると、アイコンの下に と表示されます。

## お問い合わせ先

### 株式会社カルディオインテリジェンス

Mail : [ci-smartrobin-support@cardio-i.com](mailto:ci-smartrobin-support@cardio-i.com)

Web : <https://www.smartrobin.info/>

類別	疾病診断用プログラム（管理医療機器）
一般的名称	ホルタ解析装置用プログラム（36827012）
販売名	長時間心電図解析ソフトウェア SmartRobin AI シリーズ
医療機器認証番号	302AHBZX00026Z00