

1. スタッフ新規登録時の仕様を一部変更しました

セキュリティ機能向上のため、スタッフの新規登録時に設定するログインパスワードの仕様を変更しました。リリース日以降パスワードを設定する場合は、次の条件を満たすパスワードを設定してください。

- アルファベット（大文字または小文字）を1文字以上含む
- 数字（0～9）を1文字以上含む
- 記号を1文字以上含む（文字種については、表を参照）
- 15文字以上


なお、既存のスタッフアカウントに関しては、これまでのパスワードを引き続きご利用いただけます。ただし、リリース後にパスワードの変更を行う際には、新しい仕様が適用されますのでご注意ください。




文字種	使用できる文字
アルファベット	abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
数字	0123456789
記号	-!""#\$%&()*.,/:;?@[^_`{ }~+<=>

2.HRジャンプにソート機能を追加しました

[HRジャンプ] タブメニューのリスト表示に、ソート機能を追加しました。HRジャンプが複数検出された場合、それらを時間順、あるいは持続時間の長い順に並べ替えて表示できます。

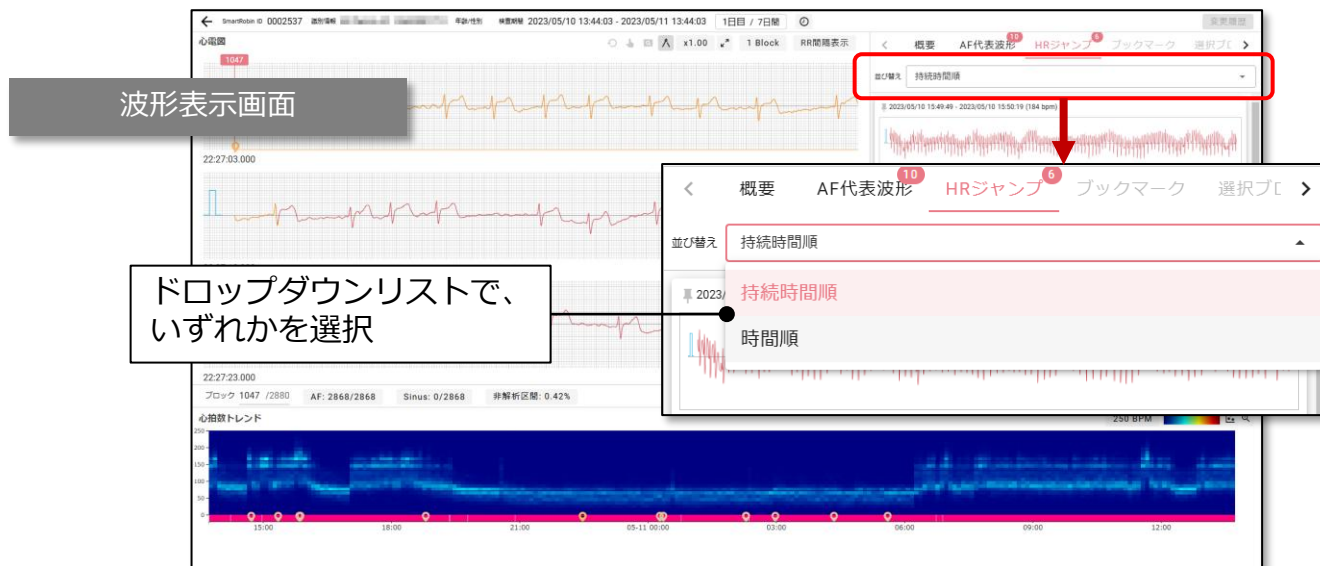

上記の変更に併せ、解析レポートのHRジャンプリストの並びは、持続時間の長い順に記載するようになりました。

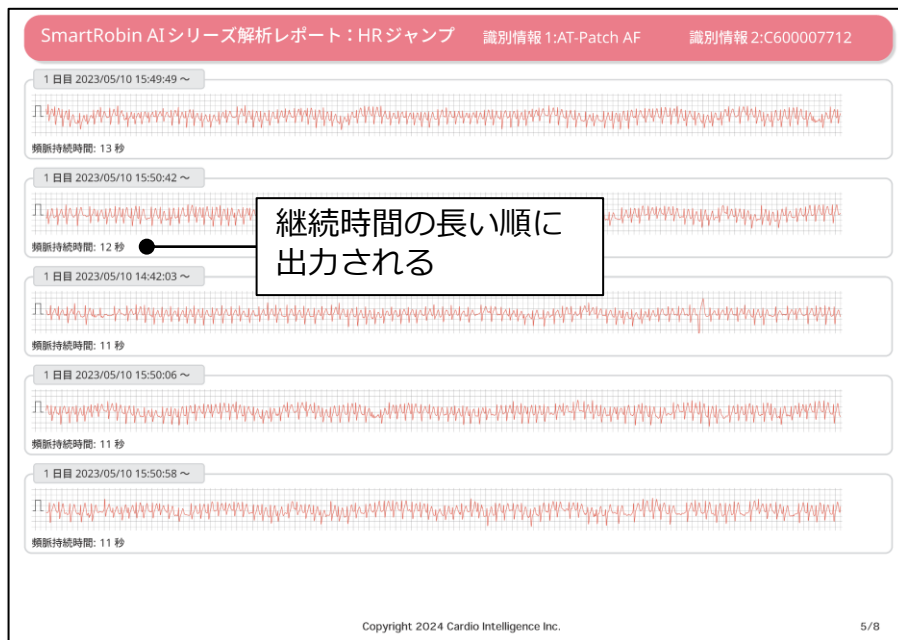

製品情報・お問合せ先

SmartRobin AI シリーズ製品情報

販売名	長時間心電図解析ソフトウェア SmartRobin AI シリーズ
一般的名称	ホルタ解析装置用プログラム (36827012)
類別	疾病診断用プログラム (管理医療機器)
医療機器認証番号	302AHBZX00026Z00

製造販売元／お問い合わせ先

株式会社カルディオインテリジェンス SmartRobinお客様サポート担当
(休祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00 受付)

Mail: ci-smartrobin-support@cardio-i.com

TEL: 090-1110-0390

HP: <https://www.cardio-i.com>